

Mise en place d'une perfusion sans adjonction



A₁

Présentation **KabiPac**®.



A₂

Pousser en avant l'ailette du Twist-off (site de perfusion) jusqu'à sa rupture.



A₃

Après retrait du capuchon protecteur du perfuseur, trocarder en tournant. **Prise d'air fermée.**

avec adjonction

Manipulation seringue /aiguille



B₁

Pousser en avant l'ailette du Twist-off (site d'adjonction) jusqu'à sa rupture.



B₂

Ajout du médicament par le site d'adjonction.

Manipulation capuchon de transfert

Désinfecter le bouchon du flacon. Cf. application d'un éventuel protocole.



C₁



Mise en place du capuchon de transfert. L'ailette du site de perfusion permet un positionnement aisé.

C₂

Passer le soluté dans le flacon en comprimant **KabiPac**®. Dissoudre le principe actif en agitant l'ensemble.



Transvaser la solution en pressant **KabiPac**®. Retirer le flacon et le capuchon de transfert.



Après reconstitution – B₂ C₂ – mise en place du perfuseur cf étapes A